

DAILIES® AquaComfort Plus™




UPUTSTVA ZA UPOTREBU – OVAJ LETAK SADRŽI VAŽNE UPUTE O UPOTREBI I SIGURNOSTI PROIZVODA. MOLIMO VAS, PROČITAJTE GA PAŽLJIVO I POZORNO. KONTAKTNE LEĆE VAM UVIJEK MORA PREPISATI OČNI SPECIJALIST. VAŽNO JE DA SLIJEDITE UPUTE SPECIJALISTA, TE SVE NAVEDENE UPUTE ZA PRAVILNO KORIŠTENJE VAŠIH KONTAKTNIH LEĆA I PROIZVODA ZA NJEGU LEĆA.

IME PROIZVODA

DAILIES® AquaComfort Plus™

MATERIJAL I PAKIRANJE

DAILIES® AquaComfort Plus™ meke kontaktne leće sadrže 31% nefilcon A i 69% vode. Plavo su tinktirane kako bi se olakšalo rukovanje; tinta sadrži Cu-phthalocyanine.

DAILIES® AquaComfort Plus™ pakirane su u 6 traka po 5 pojedinačnih blistera koje sadrže fiziološku otopinu. Fiziološka otopina sadrži HPMC i PEG400. Fiziološka otopina može sadržavati do 0,05% Poloxamera. Leće su sterilizirane parom.  Koristite ih samo ako je folija neoštećena.

NAMJENA

DAILIES® AquaComfort Plus™ namijenjene su za jednostavno nošenje (manje od 24 sata ako je osoba budna), za optičku korekciju vida osoba za zdravim očima s minimalnim astigmatizmom.

DAILIES® AquaComfort Plus™ namijenjene su jednokratnom korištenju, samo za jednostavno nošenje. 

PREPORUČENO VRIJEME NOŠENJA I IZMJENE

DAILIES® AquaComfort Plus™ nose se jednokratno i bacaju na kraju nošenja. Maksimalno dnevno vrijeme nošenja trebao bi odrediti Vaš očni specijalist.

Uz DAILIES® AquaComfort Plus™ ne koriste se sredstva za čišćenje ili dezinfekciju leća. Leće trebate baciti nakon upotrebe. Svaki puta uzmite novu leću.

NEMOJTE SPAVATI S LEĆAMA

DAILIES® AquaComfort Plus™ ne smiju se nositi tijekom spavanja. NEMOJTE nositi DAILIES® AquaComfort Plus™ leće dok spavate.

RUKOVANJE VAŠIM LEĆAMA

Vaš očni specijalist trebao bi Vam dati detaljne upute kako stavljati i skidati kontaktne leće.

Uvijek operite i osušite ruke prije rukovanja lećama. Nježno protresite blister prije otvaranja. Odignite foliju. Položite leću na dlan ruke ili, ako je nužno, nježno je otklizajte van koristeći kažiprst. Provjerite da leća nije okrenuta naopako te da imate pravu leću za to oko. Provjerite leću prije stavljanja u oko, nemojte stavljati oštećenu leću.

Kada skidate leću, važno je da imate potpuno suhe ruke. Jako trepnite nekoliko puta te, gledajući prema gore, otklizajte leću na bjeloočnicu. Nježno uklonite leću uhvativši ju između palca i kažiprsta. Ako se leća teško vadi, nemojte stiskati tkivo oka. Uzmite kapi za ovlaživanje (poput AQuify® kapi) i pokušajte ponovo nakon nekoliko minuta.


- Nikada nemojte koristiti pincetu, pumpicu, oštre predmete ili nokte kako bi izvadili leću iz blistera ili iz oka.

KADA NE NOSITI LEĆE

Kontaktne leće se ne smiju nositi u određenim zdravstvenim okolnostima ili uvjetima okoline. Uvjeti koji mogu onemogućiti ili utjecati na sigurno nošenje kontaktnih leća:

- Alergija, upala, infekcija, iritacija u ili oko očiju/vjeda.
- Razdoblje lošeg zdravlja, kao npr. teške prehlade ili gripa
- Korištenje lijekova, uključujući i lijekove za oči
- Neodgovarajući suzni film (suhe oči).
- Iznimno suha ili prašnjava okolina koja čini nošenje leća neudobnim.
- Vodeni sportovi bez korištenja naočala za plivanje.

VAŽNE NAPOMENE

- Nemojte dijeliti leće ni sa kim jer se na taj način mogu širiti mikroorganizmi što može uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme.
- Svakodnevno pregledavajte svoje oči kako biste se uvjerili da one izgledaju dobro, da imate jasan vid i osjećaj udobnosti.
- Nositeljima kontaktnih leća preporučuje se da redovito posjećuju svog očnog specijalista.
- Nemojte koristiti leće ili proizvode za njegu leća nakon isteka roka upotrebe. 
- U uvjetima slabog osvijetljenja, nositelji leća u boji mogu primijetiti da imaju lošiji vid. Nositelji progresivnih leća mogu primijetiti da imaju lošiji vid u uvjetima raznog osvijetljenja.
- Zapišite točnu dioptriju za svako oko.
- Prije stavljanja leća, provjerite na pakiranju je li točna dioptrija za svako oko.
- Uvijek nosite rezervni par leća sa sobom.
- Pažljivo koristite sapune, losione, kreme, dezodoranse ili make-up jer mogu izazvati reakciju ako dođu u dodir s lećama.
- Stavite svoje leće u oči **prije** nanošenja make-upa i izvadite ih **prije** skidanja make-upa.
- Izbjegavajte korištenje aerosola poput spreja za kosu u blizini očiju dok nosite leće jer to može uzrokovati iritaciju.
- Savjetujte sa svojim očnim specijalistom u vezi nošenja leća tijekom sportskih aktivnosti, uključujući plivanje.
- Izvadite leće kad ste u blizini otrovnih ili iritirajućih para.
- Pazite da kontaktne leće nikada ne stupe u dodir s ne-sterilnim tekućinama (uključujući vodu iz slavine i slinu) jer može doći do kontaminacije, što može dovesti do trajnog oštećenja oka.
- Obavijestite svog poslodavca da nosite kontaktne leće, posebno ako Vaš posao uključuje opremu za zaštitu očiju.
- Ako DAILIES® AquaComfort Plus™ neko vrijeme budu izložene zraku dok nisu na očima, postat će suhe i oštre. Treba ih baciti i zamijeniti novima.

MOGUĆE POTEŠKOĆE

Iako meke kontaktne leće pružaju mnoge dobrobiti korisnicima, moguća je pojava određenih poteškoća koje se mogu primijetiti kao jedan od slijedećih simptoma:

- Osjećaj stranog tijela u oko
 - Neudobna leća
 - Crvenilo oka
 - Osjetljivost na svjetlo
 - Pečenje, svrbež i suženje očiju
 - Smarjena oštrina vida
 - Efekt duge i aureole pri pogledu prema svjetlu
 - Povećano izlučivanje iz oka
 - Osjećaj neudobnosti/bol
 - Velika ili trajna suhoća očiju
- Ovi simptomi, ako se ignoriraju, mogu dovesti do ozbiljnijih komplikacija.

ŠTO UČINITI AKO SE POJAVI PROBLEM

Ako se pojavi bilo koji od navedenih simptoma:

- **ODMAH IZVADITE LEĆU/LEĆE.**

- Pregledajte oči u ogledalu i potražite neuobičajene stvari.
- Ako prestane problem osjećaja neudobnosti, stavite novu, svježiju leću.
- Ako se gore navedeni simptomi nastave nakon skidanja ili nakon ponovnog stavljanja leće, **ODMAH** skinite leću i kontaktirajte svog očno specijalista. Može se pojaviti ozbiljno stanje poput infekcije, ulceroznog keratitisa ili iritisa. Ako se ne liječe, te se poteškoće mogu brzo razviti i dovesti do trajnog gubitka vida. Manje ozbiljne reakcije poput abrazija, epitelnih mrlja i bakterijalnog konjunktivitisa moraju se pravilno tretirati kako bi se izbjegle komplikacije.
- Ako se leća potrga u oku, imat ćete osjećaj neudobnosti. Nemojte paničariti jer je nemoguće izgubiti kontaktnu leću ili dio leće iza oka. Pažljivo izvadite komadiće uhvativši ih isto kao što činite pri normalnom skidanju leće. Ako ih ne možete lako izvaditi, nemojte stiskati očno tkivo. Isperite fiziološkom otopinom. Ako to ne pomogne, kontaktirajte svog očno specijalista. Vaš specijalist može Vam pronaći komadiće leće koristeći fluorescin.
- Povremena suhoća oka može se smanjiti korištenjem kapi za ovlaživanje (kao AQuify®). Ako je suhoća i dalje prisutna, savjetujte se sa svojim očnim specijalistom.

DODATNE INFORMACIJE

Rizik mogućeg problema može se smanjiti prepoznavanjem znakova i slijedenjem savjeta "Što učiniti ako se pojavi problem". Nošenje kontaktnih leća povećava rizik infekcije oka. Pušenje dodatno povećava rizik ulceroznog keratitisa za korisnike kontaktnih leća.



Proizvođač:
CIBA VISION Corporation
Duluth, Georgia 30097, SAD



EU zastupnik:
CIBA VISION GmbH
638668 Grosswallstadt, Njemačka

Zastupnik za RH i nositelj upisa u očevidnik
proizvođača medicinskih proizvoda:

Splendor d.o.o.
Maksimirska 98, Zagreb
splendor@splendor.hr

Skraćenice na specifikacijama leća:

BC	Bazna zakrivljenost
PWR	Dioptrija
DIA	Dijametar
R	Desno
L	Lijevo

Leće dostupne ovisno o zalihama

Datum pripreme: 03/2010.

CIBA VISION™