

PRECISION UV®




UPUTE ZA UPOTREBU – OVAJ LETAK SADRŽI VAŽNE UPUTE ZA UPOTREBU I SIGURNOST PROIZVODA. MOLIMO VAS DA IH POZORNO PROČITATE. KONTAKTNE LEĆE VAM UVIJEK MORA PROPISATI OČNI SPECIJALIST. VAŽNO JE DA SLIJEDITE UPUTE SPECIJALISTA, TE SVE NAVEDENE UPUTE ZA PRAVILNO KORIŠTENJE VAŠIH KONTAKTNIH LEĆA I PROIZVODA ZA NJEGU LEĆA.

IME PROIZVODA PRECISION UV®

MATERIJAL I PAKIRANJE

Precision UV (vasurfilcon A) meke kontaktne leće sadrže 26% vasurfilcon A (s kromoforima koji apsorbiraju UV zrake) i 74% vode. Leće su obojane D&C zelenom bojom br.6.

Precision UV kontaktne leće pakirane su u pojedinačne blistere koji sadrže fiziološku otopinu i sterilizirane su parom. **STERILE**  Koristite ih samo ako je folija neoštećena.

NAMJENA

Precision UV namijenjene su za dnevno nošenje za optičku korekciju vida osoba sa zdravim očima s minimalnim astigmatizmom.

PREPORUČENO VRIJEME NOŠENJA I IZMJENE

CIBA Vision preporuča da se **Precision UV** kontaktne leće bace i zamijene novim parom u razdoblju do 3 mjeseca.

U cilju održavanja zdravlja i sigurnosti Vaših očiju, raspored nošenja trebao bi odrediti Vaš specijalist.

RUKOVANJE VAŠIM LEĆAMA

Vaš očni specijalist trebao bi Vam dati detaljne upute kako stavljati i skidati kontaktne leće.

Uvijek operite i osušite ruke prije rukovanja lećama. Nježno protresite blistere prije otvaranja. Odignite foliju. Položite leću na dlan ruke ili, ako je nužno, nježno je otklizite van koristeći kažiprst. Provjerite da leća nije okrenuta naopako te da imate pravu leću za to oko. Provjerite leću prije stavljanja u oko, nemojte stavljati oštećenu leću.

Kada skidate leću, važno je da imate potpuno suhe ruke. Jako trepnite nekoliko puta te, gledajući prema gore, otklizite leću na bjeloočnicu. Nježno uklonite leću uhvativši ju između palca i kažiprsta.

Nikada nemojte koristiti pincetu, pumpicu, oštre predmete ili nokte kako bi izvadili leću iz blistera ili iz oka.

BRIGA O LEĆAMA

- ADEKVATNA NJEGA LEĆA JE NUŽNA.
- DEZINFICIRAJTE svoje leće svaki puta kada ih izvadite kako biste uništili štetne bakterije te osigurali sigurno i udobno nošenje kontaktnih leća.
- Vaš očni specijalist trebao bi odabrati sustav njege leća koji je najprikladniji za Vas. CIBA VISION preporuča slijedeće proizvode za korištenje uz Vaše Precision UV leće.


Otopine za dezinfekciju na bazi peroksida
AOSEPT® Plus

Sve-u-jednom-otopine
SOLO-care Aqua®

Kapi za ovlaživanje očiju
Aquify®

- Savjetujte se sa svojim očnim specijalistom prije korištenja alternativnih proizvoda za njegu leća.
- Nemojte mijenjati ili miješati razne sustave proizvoda za njegu leća.
- Koristite samo proizvode za njegu mekih kontaktnih leća slijedeći uputstva proizvođača.
- PAZITE DA KONTAKTNE LEĆE NIKADA NE STUPE U DODIR S NE-STERILNIM TEKUĆINAMA (UKLJUČUJUĆI VODU IZ SLAVINE I SLINU) JER MOŽE DOĆI DO KONTAMINACIJE, ŠTO MOŽE DOVESTI DO TRAJNOG OŠTEĆENJA OKA.
- NEMOJTE KORISTITI BILO KAKAV PROIZVOD DIZAJNIRAN ZA TVRDE ILI POLUTVRDE LEĆE.

Imajte na umu slijedeće:

- Uvijek operite i osušite ruke prije rukovanja lećama.
- Nikada nemojte pohraniti leće preko noći samo u fiziološkoj otopini. Fiziološka otopina NEĆE zaštititi Vaše leće od bakterija niti Vaše oči od moguće infekcije.
- Nikada nemojte ponovo koristiti otopinu iz Vaše posudice za leće.
- Nikada nemojte koristiti otopinu kojoj je istekao rok trajanja. 
- Pazite da kontaktne leće nikada ne stupe u dodir s ne-sterilnim tekućinama (uključujući vodu iz slavine i slinu) jer može doći do kontaminacije, što može dovesti do trajnog oštećenja oka.
- Isperite posudicu za leće svaki puta kada izvadite leće iz nje. Koristite sterilnu fiziološku otopinu ili svježu otopinu za leće. To smanjuje rizik od onečišćenja i ozbiljne ozljede oka.
- Redovito mijenjajte svoju posudicu za leće.

AKO NISTE NOSILI LEĆE NEKOLIKO DANA, slijedite upute o režimu čišćenja koje ste dobili, te, ako je moguće, očistite i dezinficirajte svoje leće prije stavljanja.

KADA NE NOSITI LEĆE

Kontaktne leće ne smiju se nositi u određenim zdravstvenim okolnostima ili uvjetima okoline. Uvjeti koji mogu onemogućiti ili utjecati na sigurno nošenje kontaktnih leća:

- Alergija, upala, infekcija, iritacija u ili oko očiju/vjeda.
- Razdoblje lošeg zdravlja, kao npr. teške prehlade ili gripa
- Korištenje lijekova, uključujući i lijekove za oči
- Iznimno suha ili prašnjava okolina koja čini nošenje leća neudobnim.
- Vodeni sportovi bez korištenja naočala za plivanje.
- Neodgovarajući suzni film (suhe oči)

Konzultirajte svog očnog specijalista upravo u vezi tih ili sličnih uvjeta.

MOGUĆE POTEŠKOĆE

Iako meke kontaktne leće pružaju mnoge dobrobiti korisnicima, moguća je pojava određenih poteškoća koje se mogu primijetiti kao jedan od slijedećih simptoma:

- Osjećaj stranog tijela u oko
- Neudobna leća
- Crvenilo oka
- Osjetljivost na svjetlo
- Pečenje, svrbež i suzenje očiju
- Smanjena oštrina vida
- Efekt duge i aureole pri gledanju prema svjetlu
- Povećano izlučivanje iz oka

- Osjećaj neudobnosti/bol
- Velika ili trajna suhoća očiju

Ovi simptomi, ako se ignoriraju, mogu dovesti do ozbiljnijih komplikacija.

ŠTO UČINITI AKO SE POJAVI PROBLEM

Ako se pojavi bilo koji od navedenih simptoma:


• ODMAH IZVADITE LEČU/LEĆE.

- Ako prestane problem osjećaja neudobnosti, pažljivo pregledajte leću.
- Ako je leća na bilo koji način oštećena, NEMOJTE ju stavljati natrag u oko: zamijenite ju novom lećom ili se savjetujte sa svojim očnim specijalistom.
- Ako leća ima prljavštine, trepavicu, ili strano tijelo na sebi, ili ako problem prestane i leća izgleda neoštećeno, temeljito ju očistite, isperite i dezinficirajte/neutralizirajte prije nego što ju ponovo stavljate.
- Ako se gore navedeni simptomi nastave nakon skidanja ili nakon ponovnog stavljanja leće, ODMAH skinite leću i kontaktirajte svog očnog specijalista. Može se pojaviti ozbiljno stanje poput infekcije, ulceroznog keratitisa ili iritisa. Ako se ne liječe, te se poteškoće mogu brzo razviti i dovesti do trajnog gubitka vida. Manje ozbiljne reakcije poput abrazija, epitelnih mrlja i bakterijskog konjunktivitisa moraju se pravilno tretirati kako bi se izbjegle komplikacije.
- Povremena suhoća oka može se smanjiti korištenjem kapi za ovlaživanje (kao AQuify®). Ako je suhoća i dalje prisutna, konzultirajte svog očnog specijalista.
- Ako se leća zalijepi (prestane se kretati), kapnite par kapi za ovlaživanje i pričekajte dok se leća ne počne slobodno kretati po oku prije nego što ju pokušate skinuti. Ako leća i dalje ostaje zalijepljena, ODMAH konzultirajte svog očnog specijalista.

DODATNE INFORMACIJE

Rizik mogućeg problema može se smanjiti prepoznavanjem znakova i slijedenjem savjeta "Što učiniti ako se pojavi problem". Nošenje kontaktnih leća povećava rizik infekcije oka. Pušenje dodatno povećava rizik ulceroznog keratitisa za korisnike kontaktnih leća.

VAŽNE NAPOMENE

- Nositeljima kontaktnih leća preporučuje se da redovito posjećuju svog očnog specijalista
- Nemojte koristiti leće ili proizvode za njegu leća nakon isteka roka upotrebe. 

- Zapišite točnu dioptriju za svako oko.
- Pažljivo koristite sapune, losione, kreme, dezodoranse ili make-up jer mogu izazvati reakciju ako dođu u dodir s lećama.
- Stavite svoje leće u oči **prije** nanošenja make-upa i izvadite ih **prije** skidanja make-upa.
- Izbjegavajte korištenje aerosola poput spreja za kosu u blizini očiju dok nosite leće jer to može uzrokovati iritaciju.
- Savjetujte se svojim očnim specijalistom u vezi nošenja leća tijekom sportskih aktivnosti, uključujući plivanje.
- Izvadite leće kad ste u blizini otrovnih ili iritirajućih para.
- Obavijestite svog poslodavca da nosite kontaktne leće, posebno ako Vaš posao uključuje opremu za zaštitu očiju.
- Kontaktne leće koje pružaju UV zaštitu NISU zamjena za naočale s UV zaštitom.



Proizvođač:
CIBA VISION Corporation
Duluth, Georgia 30097, SAD



EU zastupnik:
CIBA VISION GmbH
638668 Grosswallstadt, Njemačka

Zastupnik za RH i nositelj upisa u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda:

Splendor d.o.o.
Maksimirska 98, Zagreb
splendor@splendor.hr

Skraćenice na specifikacijama leća:

BC	Bazna zakrivljenost
PWR	Dioptrija
DIA	Dijametar

Leće dostupne ovisno o zalihama

Datum pripreme: 02/2010.

CIBA VISION™